



Vivo 3

by Breas

医用有创、无创 & 高流量一体通气解决方案

Vivo By Breas 3 专为慢性呼吸功能不全的非依赖性患者设计，提供舒适、个性化的无创、有创及 HFNT 呼吸支持。其直观的用户界面简洁易用，使医护人员能够迅速上手并高效操作。Vivo By Breas 3 内置了多种治疗模式及全面的监测功能，为医护人员提供高效呼吸治疗解决方案，以更好地满足患者的需求。



多种治疗功能， 适用更多临床需求

- 有创气切、无创、HFNT 经鼻高流量氧疗
- 适用成人与儿童 (>10kg)
- 多种可选配件：SpO₂ 监测、远程警报及护士呼叫



丰富的通气模式

- PSV、PCV、S、S/T、T、CPAP
- AutoEPAP 自动呼气压力算法
- TgV (目标潮气量)
- HFNT



内置 3 小时锂电池

- 支持更多转运及户外场景
- 更高安全保障



独有的 Esync 算法， 更高舒适度

- 不受漏气影响
- 9 个档位，精准匹配患者呼吸努力

Vivo By Breas 3 技术规格

设置/性能

通气模式	S、ST、T、PSV、PCV+A、CPAP、HFNT
成人/儿童	>10 kg
配置	3 个可设置的处方
IPAP	4-40 cmH ₂ O
EPAP	2-20 cmH ₂ O
呼吸频率/备用频率	0-40 bpm
吸气时间	0.3-3 秒
升压时间	1-9
吸气触发	1-9
呼气触发	1-9
最短吸气时间	关, 0.3 - 3 秒
最长吸气时间	关, 0.3 - 3 秒
目标潮气量	100 - 1500 ml
延时升压 (向上 / 向下)	关, 10 - 60 分钟
Auto-EPAP	开 / 关, 压力限制: 最大 EPAP +2 cmH ₂ O - 40 cmH ₂ O, PS 2 - 38cmH ₂ O, 最小 / 最大 EPAP 2 - 20 cmH ₂ O, EPAP 步长: 0.5 - 2 cmH ₂ O, 释放时间: 2 - 12 分钟 / 关
HFNT 经鼻高流量 湿化氧疗模式	4 - 60 升 / 分钟
湿化器档位	1-5
加温管路	关, 1-5
患者管路	15 mm, 22 mm, 自定义
O ₂ 接入 (设备)	0 - 30 升 / 分钟

监测

显示数据	吸气峰压、呼气压、漏气量、分钟通气量、呼出潮气量、TgV 占比 %、总呼吸频率、IE、自主呼吸频率、自主呼吸频率 %、吸气时间、升压时间、SpO ₂ 、脉搏率
------	--

电源

主电源	100 至 240 V AC
外部直流电源	24 V
内置电池	3 小时

警报

警报	高压、低压、高呼吸频率、低呼吸频率、高分钟通气量、低分钟通气量、重复呼吸、呼吸暂停、断开连接、高 SpO ₂ 、低 SpO ₂ 、高脉搏率、低脉搏率、电源故障
----	---

尺寸

宽 x 高 x 深	166 x 185 x 200 mm
重量	1.8 kg
噪音级别 (在 10 cm H ₂ O 恒定压力下)	小于 30dB (A)

连接和软件

内置连接	USB
兼容软件	PCSW 专业分析软件
即插即用配件	SpO ₂ , 护士呼叫, 远程报警, 配件盒

其他

湿化器	集成水箱
回路	带 / 不带加热丝的可清洗及一次性呼吸回路
确认停止	开, 关
依从性数据 (屏显)	每日最短使用时间, 关闭, 1 - 24 小时, 使用总时长, 总天数, 使用天数, 平均使用时间, 依从性天数, AHI

预期用途

产品用于为患有呼吸功能不全或阻塞性睡眠呼吸暂停的患者提供通气治疗。适用于体重超过 10 千克, 具有自主呼吸的患者, 不适用于生命支持。
注册证编号: 琼械注准20242080078

Breas, the Breas logo, Vivo by Breas and EveryWare by Breas are trademarks of Breas Medical AB. © 2026 Breas Medical AB - All rights reserved. Breas Medical AB reserves the right to make changes in specifications and features shown herein, or discontinue the product described at any time without notice or obligation. Contact your Breas representative for the most current information.

Issued: March 2026. COR-SAL-MAR-000364-Rev9.



广告



博毅雅 (上海) 医疗科技有限责任公司

联系地址: 上海市普陀区怒江北路449弄8号6幢3楼

联系电话: 400-688-0756

联系邮箱: servicechina@breas.com

琼械广审(文)第260426-00108号

禁忌内容或者注意事项详见说明书

请仔细阅读产品说明书或在医务人员的指导下购买和使用。